

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТ СИСТЕМЫ

Диагностические тест системы



ЭКСПРЕСС ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ТАШКЕНТЕ SARS-COV-2 NUCLEOCAPSID (N) (COLLOIDAL GOLD METHOD)



Экспресс тест на коронавирус SARS-COV-2 Nucleocapsid (N)
(Colloidal Gold Method)

Тип теста: Тест на антиген

Принцип тестирования: Colloidal Gold Method (Метод коллоидного золота)

Образец мазка: Назальный сваб

Количество раствора: 3 капли раствора (около 100µl)

Количественный/Качественный: Качественный

Время на определение: 15 минут

Рабочая температура: 15-30°C

Температура хранения: 2-30°C

Количество тестов в наборе: 25 шт

Диагностическая чувствительность: 99,22%

Диагностическая специфичность: 99,33%

Комплект:



- 1) 25 тест-кассет.
- 2) 25 экстракционных буферов.
- 3) 25 экстракционных пробирок.
- 4) 25 стерилизованных свабов.
- 5) 1 инструкция.

Сертификаты:

- 1) ISO 13485 – на производство экспресс тестов на антиген для определения COVID-19
- 2) CE сертификат

Экспресс тест на коронавирус в Узбекистане

[Все экспресс тесты](#)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Экспресс тест-системы](#)

ЭКСПРЕСС ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНА "COVID-19" (COLLOIDAL GOLD METHOD)



<https://avikontex.uz/wp-content/uploads/2021/06/42m-singclean-covid-19-antigen-test-kit.mp4>

Экспресс тест для определения антигена "COVID-19" (Colloidal Gold Method)

Типа теста: Тест на антиген
Принцип тестирования: Colloidal Gold Method
Образец мазка: Назальный сваб
Количество раствора: 3 капли раствора (около 100µl)
Количественный/Качественный: Качественный
Время на определение: 15 минут
Рабочая температура: 15-30°C



Температура хранения: 4-30°C
Срок годности: 24 месяца

Экспресс тест на антиген Covid Colloidal Gold Method в Узбекистане

[Все экспресс тесты](#)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Экспресс тест-системы](#)



НАБОР РЕАГЕНТОВ ИФА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСА ОСПЫ СЛИВЫ

Набор реагентов ИФА для выявления вируса оспы сливы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)



НАБОР РЕАГЕНТОВ ИФА для выявления БАКТЕРИАЛЬНОГО НЕКРОЗА ВИНОГРАДА


Набор реагентов ИФА для выявления бактериального некроза винограда

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)

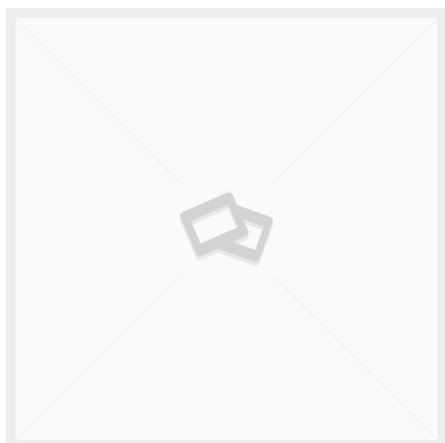

НАБОР РЕАГЕНТОВ ИФА для обнаружения БАКТЕРИАЛЬНОГО РАКА ЦИТРУСОВЫХ

Набор реагентов ИФА для обнаружения бактериального рака цитрусовых

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)



ТЕСТ ПОЛОСКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВИРУСА ОСПЫ СЛИВЫ

Тест полоски положительного контроля для вируса оспы сливы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)



РЕАГЕНТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВИРУСА МОЗАИКИ ЯЧМЕННОЙ ПОЛОСКИ

Реагент положительного контроля для вируса мозаики ячменной полоски

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)



РЕАГЕНТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ АНДИЙСКОГО ЛАТЕНТНОГО ВИРУСА КАРТОФЕЛЯ

Реагент положительного контроля для андийского латентного вируса картофеля

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)



РЕАГЕНТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВИРУСА АМЕРИКАНСКОГО ЛЕНТОЧНОГО УЗОРА СЛИВЫ

Реагент положительного контроля для вируса американского ленточного узора сливы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)



НАБОР РЕАГЕНТОВ ИФА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОЖОГА ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Набор реагентов ИФА для выявления бактериального ожога
плодовых культур

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)



НАБОР РЕАГЕНТОВ ИФА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИРУСА МОЗАИКИ ЯЧМЕННОЙ ПОЛОСКИ

Набор реагентов ИФА для выявления вируса мозаики ячменной
полоски

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)

НАБОР ИФА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНДИЙСКОГО ЛАТЕНТНОГО ВИРУСА КАРТОФЕЛЯ



Набор Ифа для обнаружения андийского латентного вируса картофеля

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)

НАБОР РЕАГЕНТОВ ИФА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АМЕРИКАНСКОГО ВИРУСА ЛЕНТОЧНОГО УЗОРА СЛИВЫ



Набор реагентов ИФА для диагностики американского вируса ленточного узора сливы

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: Цена по запросу

Категория: [Фитосанитарная диагностика](#)

ЭКСПРЕСС ТЕСТ, НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНА SARS-COV-2 (BIOCREDIT COVID-19 Ag), 20 ТЕСТОВ/НАБОР



Набор реагентов BIOCREDIT COVID-19 Ag предназначен для качественного и быстрого выявления COVID-19 в биологическом материале человека (мазок из носоглотки).



BIOCREDIT COVID-19 Ag является быстрой альтернативой ПЦР, не требующий лабораторного оборудования и специальных условий проведения.

Рекомендации по применению

Процедура взятия мазка из области носоглотки:

1. Для взятия биологического биологического образца из носоглоточной области, с осторожностью введите тампон на палочке в носовую полость. Продолжайте аккуратно вводить тампон до тех пор, пока не встретите сопротивления в носовой раковине.
2. Мягкими движениями пальцев несколько раз поверните палочку с тампоном вокруг своей оси и извлеките ее из носовой полости.
3. Визуально убедитесь в том, что кончик тампона увлажнен.

Обращение с взятыми биологическими образцами должно быть осторожным, с учетом существующей угрозы инфицирования. Недостаточный или избыточный объем образца, равно как недостаточный или избыточный объем буфера могут привести к получению неточных (недостовверных или искаженных) результатов тестирования. Результаты теста интерпретируются согласно прилагаемой инструкции через 5-8 минут.

Дополнительные материалы, которые необходимы (не входит в комплект поставки): защитные перчатки и очки, медицинская маска.

Получение отрицательного результата не исключает наличие инфекции, в случае недавнего инфицирования. Тестирование может дать отрицательный результат в том случае, если содержание коронавируса в биологическом образце находится на уровне ниже предела обнаружения.

Описание

Набор реагентов BIOCREDIT COVID-19 Ag предназначен для качественного и быстрого выявления COVID-19 в биологическом материале человека (мазок из носоглотки). BIOCREDIT COVID-19 Ag является быстрой альтернативой ПЦР, не требующий лабораторного оборудования и специальных условий проведения. Входит в перечень зарегистрированных тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.

Тест представляет собой полоски, с предварительно нанесенными реагентами. На мембранную полоску реагентов линии Т

предварительно нанесены антитела, специфические к антигену коронавируса SARS-CoV-2. При наличии в испытуемом биологическом образце антигена коронавируса SARS-CoV-2, в результате тестирования по линии проявляется видимая полоска черного цвета. Линия контроля С предусмотрена в тест-системе в качестве средства для интегрирования корректного выполнения процедуры тестирования. Окрашивание линии контроля С должно проявляться при любых условиях, безотносительно результатов теста, при правильном выполнении испытательной процедуры.

Результат

Расшифровка результата экспресс-теста:

- Если линия (С) окрашивается в красный цвет: Анализ дал отрицательный результат на наличие антигена к коронавирусу.
- Если линия (С) окрашивается в красный цвет а линия (Т) в черный: Анализ дал положительный результат на наличие антигена к коронавирусу.
- При отсутствии в окошке окрашенной в красный цвет линии (С): Результат тестирования является недействительным. Причиной может быть нарушение требований взятия биологического образца, и/или процедур проведения анализа, или негодность используемой испытательной тест-системы.

Экспресс тест на антиген Covid BIOCREREDIT в Узбекистане

[Все экспресс тесты](#)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: 0 UZS

Категория: [Экспресс тест-системы](#)

ИФА ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ "IGG" К КОРОНАВИРУСУ COVID-19



ИФА тест на выявление IgG к коронавирусу в Ташкенте

Набор реагентов для качественного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа «ЭБМ-SARS-CoV-2-IgG».

Набор рассчитан на проведение 96 тестов.

Серологическое исследование при COVID-19:

- Установление факта перенесенной инфекции.
- Оценка напряженности гуморального иммунитета.
- Оценка коллективного иммунитета.
- Оценка эффективности вакцинации.
- Тестирование организованных групп населения.
- Выявление гипериммунных реконвалесцентов с целью использования донорской плазмы крови для лечения тяжелых больных.

Гуморальный иммунный ответ на антитела SARS-CoV-2 развивается на второй неделе болезни:

- Стадия № 1: в крови появляются IgM, их титр быстро нарастает, достигая максимума на 3-4 неделе болезни.
- Стадия № 2: титр IgM снижается.
- Стадия № 3: титр IgG медленно нарастает и сохраняется длительное время на высоком уровне.

Состав набора:

Иммуносорбент – 1 планшет
Концентрат конъюгата (КК), 1,2 мл – 1 флакон
Положительный контроль (ПК), 0,1 мл – 1 флакон
Отрицательный контроль (ОК), 0,15 мл – 1 флакон
Концентрат промывочного раствора (КПР), 30 мл – 1 флакон
Раствор для разведения сывороток (РРС), 10 мл – 1 флакон
Раствор для разведения конъюгата (РПК), 12 мл – 1 флакон
ТМБ-субстрат, 11 мл – 1 флакон
Стоп реагент, 11 мл – 1 флакон
Клейкая пленка – 3 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: 0 UZS

Категория: [Тесты на коронавирус](#)





ТЕСТ-СИСТЕМА «АРТТЕСТ COVID-19» (ПЦР) 100 ИССЛЕДОВАНИЙ В КОМПЛЕКТЕ С РЕАГЕНТАМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ РНК «АРТРНК ЭКСТРАКТ» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ТЕСТ- СИСТЕМОЙ "АРТТЕСТ COVID-19"

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ

Тест-система «АртТест COVID-19» (ПЦР) 100 исследований в комплекте с Реагентами для очистки **РНК «АртРНК экстракт»** для использования с тест-системой **"АртТест COVID-19"**

Тест-система **«АртТест COVID-19»** предназначена для выявления **РНК** коронавируса **COVID-19** методом одностадийной ОТ-ПЦР с детекцией результатов в режиме «реального времени» в лабораторной клинической практике.

Комплект реагентов для очистки **РНК «АртРНК экстракт»** предназначен для экстракции суммарной **РНК/ДНК** из клинического материала: мазков, соскобов и отделяемого слизистых оболочек урогенитального, респираторного и пищеварительного трактов, а также из биологических жидкостей (мочи, секрета предстательной железы, плазмы, сыворотки, слюны, отделяемого конъюнктивы, ликвора, плевральной, синовиальной и амниотической жидкостей, БАЛ, спермы), фекалий, кровососущих членистоногих и проб из ОСОЧ для последующего исследования методами ПЦР, ОТ-ПЦР, в том числе с детекцией результатов в режиме реального времени.

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: 0 UZS

Категория: [Тесты на коронавирус](#)

ЭКСПРЕСС ТЕСТ НА ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ "IGM/IGG" К КОРОНАВИРУСУ COVID-19

Экспресс тест на выявление антител "IgM/IgG" к коронавирусу COVID-19

Набор содержит 25 тест кассет и буфер для разведения образца

Набор для качественного определения специфических антител IgM и антител IgG против нового коронавируса (SARS-CoV-2) в образцах клинического материала человека (сыворотка, плазма, венозная цельная кровь).



В этом наборе применяется принцип хроматографического иммуноанализа с боковым потоком и используется метод захвата для выявления специфических антител IgM и IgG против нового коронавируса в образцах клинического материала человека (сыворотка, плазма и венозная цельная кровь).

Результат за 15 минут

Набор содержит 25 тест кассет и буфер для разведения образца

Надежность

Проверка иммуноглобулинов IgG / IgM за один раз

В случае инфицирования коронавирусом организм отвечает синтезом антител IgM и IgG. При этом антитела IgM появляются уже в течение 1-ой недели от начала инфекции, достигая пика через 2-3 недели. Напротив, антитела IgG появляются позднее (в среднем через 14 дней от начала инфекции) и достигают пика через 5 недель. При этом они могут сохраняться в организме в течение 6 месяцев или даже нескольких лет. Длительность снижения уровня IgG в крови также является важным диагностическим признаком степени инфицирования пациента.

Тест-набор содержит тест-кассеты с выделенными реакционными областями, покрытыми анти-человеческими антителами IgM и IgG, латексные частицы, меченые спайк-белком вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) и нуклеокапсидным белком.

При выполнении анализа образцы взаимодействуют с рекомбинантными антигенами вируса SARS-CoV-2 (COVID-19), которыми мечены латексные частицы. Реакционная смесь мигрирует по тест-кассете и реагирует с антителами IgM и/или IgG, окрашивая одну или обе контрольные линии. Окраска одной из двух или обеих контрольных линий означает положительный результат на коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19). Кроме того, при правильном выполнении теста окрасится еще одна (контрольная) линия на тест-кассете (внутренний контроль тест-набора).

Методика проведения теста

Перед тестированием все компоненты тест-набора (тест-кассета, пипетки и буферный раствор) должны прогреться до комнатной температуры.

1

2

3

Извлеките тест-кассету из запечатанного фольгированного пакета и без промедления используйте ее для тестирования. Наилучшие результаты получают при немедленном использовании кассеты после ее распаковки.	В лунку для образца (S) поместите 10 мкл сыворотки или плазмы крови или 20 мкл (1 капля) цельной крови пациента, после этого добавьте туда около 80 мкл (примерно 2-3 капли) буферного раствора и включите секундомер (таймер).	Следите за появлением цветных (одной, двух, или трех) линий. Подождите 10-15 минут и определите наличие/отсутствие цветных линий. После 15-ой минуты тестирования результаты недействительны.
--	---	---

Экспресс тест на выявление антител в Узбекистане

[Все экспресс тесты](#)

[Read More](#)

Артикул: N/A

Цена: 0 UZS

Категория: [Экспресс тест-системы](#)